
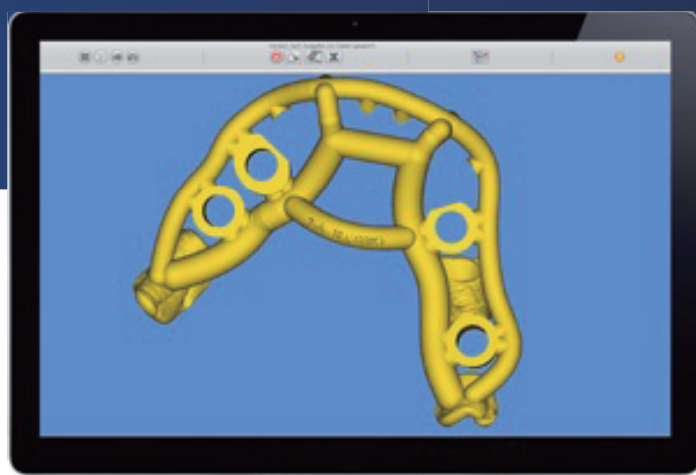


精密なインプラント治療をサポート

SMOP

各メーカーのインプラントに対応したガイドシステム

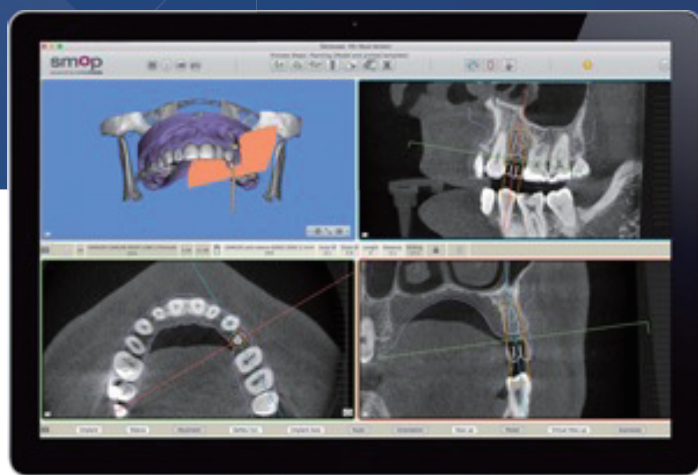

カムログ専用ではなく、各メーカー純正ガイドドリルに対応したサージカルテンプレートで、世界中のインプラントシステムに対応しています。

01 高精度設計

DICOMデータ、STLデータマッチングによる高精度の設計

02 初期費用が不要

シュミレーションソフトなどの費用が0

03 安心サポート

専任技工士による設計、フォロー体制

技工料金

初期費用

無料

SMOPアカウント
有り

33,000 ~

SMOPアカウント
無し

43,000 ~

**専任Drによる設計
相談も可能**

発注に必要なもの


1. STLデータ/模型

- ・ DICOMデータとのマッチングには粘膜面が重要。模型の過度なトリミングは控えてください。
- ・ 上顎のサージカルガイドを製作する際は口蓋全体も印象を取ってください。
- ・ 印象採得日は正確に記入をお願いします。
- ・ 印象採得日の期間が大きく空いている場合、製作をお断りする場合があります。

2. DICOMデータ


- ・ データを上下切り離せるように開口で撮影してください。
 - ・ サージカルガイド製作の顎(上顎もしくは下顎)は頬粘膜と顎堤に空気層ができるようにロールワッテを左右の頬棚に入れて撮影をお願いします。
 - ・ 患者が撮影時に動いてしまった、粘膜面が見えないなど、マッチングできないと判断した場合は再撮影と納品日の調整をさせていただきます。
- *DICOMデータとのマッチングには粘膜面が重要です。
*データに不具合(粘膜面が不明瞭、左右のずれ)がある場合は別途請求が掛かる場合があります。
- ・ 撮影日は正確に記入してください。
 - ・ CT撮影日の期間が大きく空いている場合、製作をお断りする場合があります。

発注から納品までの流れ

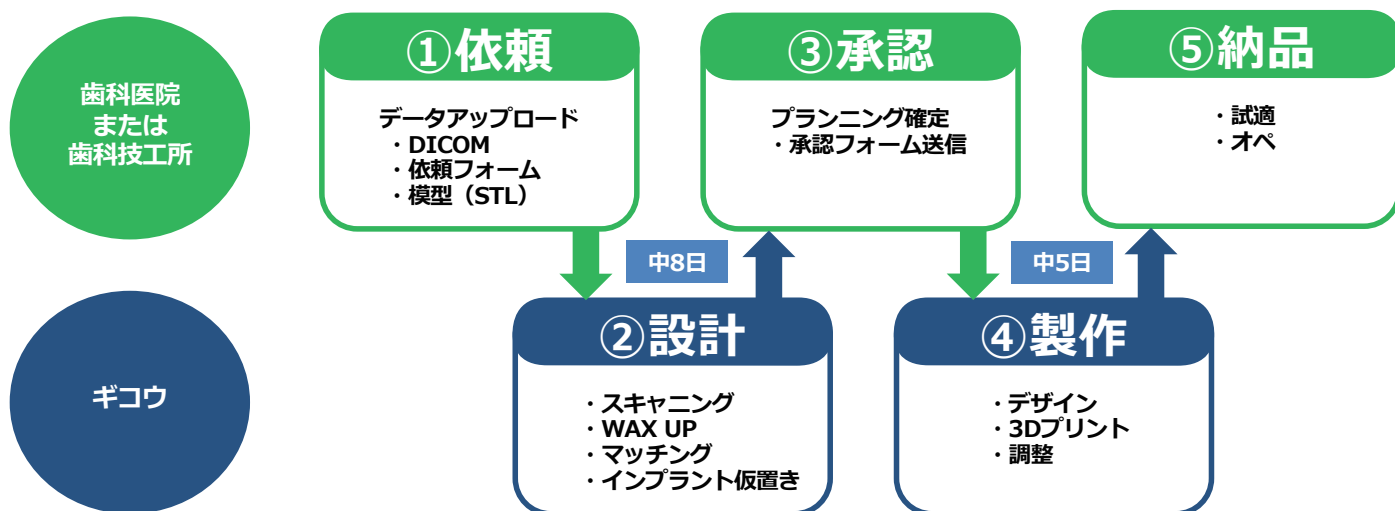

CT撮影時の注意点

CT撮影の際にはロールワッテ等を使用し、空気層のスペースを作ってください。頬粘膜と歯茎部が空気層で分離されるため、模型とDICOMデータとの重ね合わせがより正確に行うことができます。

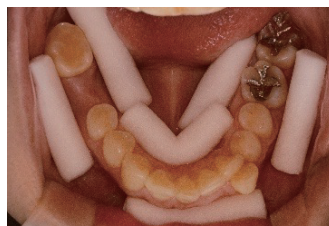

歯科技工の未来を創造する

株式会社 **ギコウ**

TEL : 0120-458-239(本社 フリーダイヤル)
Mail : info@labogiko.jp
http://www.labogiko.jp

■ 本社・工場
■ GIKO Tokyo
■ GIKO Osaka
■ GIKO Iizuka

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-8-11
TEL 092-580-8020 FAX 092-580-8022
〒156-0045 東京都世田谷区桜上水 2-8-10
TEL 03-6456-1535 FAX 03-6456-1536
〒570-0064 大阪府守口市長池町 1-6
〒820-0044 福岡県飯塚市横田 770-1

■ 本社第2工場
■ 熊本営業所
■ 沖縄営業所

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-8-9
〒860-0833 熊本県熊本市中央区平成 3-5-13
〒901-2133 沖縄県浦添市城間 4-11-2-1F